
Használati és kezelési útmutató - NANOFIL® Bonding Agent

Termékleírás

A NANOFIL® Bonding Agent B-10 egy fényre kötő total-etch ragasztó, amely a polymer alapú ragasztók közé tartozik. Használható fényre kötő kompozitokkal és kompomerekkel, cementekkel és csomkfelépítővel kombinálva. A ragasztó polimerizálható LED és halogén fényforrások használatával is. A NANOFIL® Bonding Agent B-10 üveges kiserelésű az egyedi adagolhatóság érdekében.

Kiserelés

5 ml/üveg

Osztályozás

Típus:2, osztály: 2 csoport: 1 az ISO4049:2019-nek megfelelően.

Összetevők

NANOFIL® Bonding Agent B-10 PMGDM-t, HEMA-t, kötési iniciátort és acetont tartalmaz.

Javallatok

- Minden class-ba tartozó kompozit tömésekhez
- Kompozittal történő csomkfelépítésekhez
- Meglévő kompozit javításokhoz
- Cementezésekhez

Ellenjavallatok

- Ne használja Bonding Agent-re való ismert hiperszenzitivitás esetén.
- Ne használja önkötő kompozitokhoz.

Mellékhatások

Ez a termék vagy egy összetevője bizonyos esetekben hiperszenzitív reakciókat válthat ki.

Óvintézkedések

Páciensek számára

A termék bizonyos összetevői bőr kontakton keresztül allergiás reakciót válthat ki. Kerülje a termék használatát olyan páciensek esetében akik allergiásak az akrilátok. Ha hosszan tartóan érintkezik a száj szöveteivel, öblítse le vízzel.

Amennyiben allergiás reakció lép fel, szükség esetén kérjen orvosi ellátást.

Felhasználók számára

A termék bizonyos összetevői végtag- és szemkontaktus esetén allergiás reakciót válthat ki. Az allergiás reakció esélyének csökkentése érdekében viseljen védőkesztyűt és szemüveget.

Bőrrel való érintkezés esetén mossa le bő szappanos vízzel. Kézzel való érintkezés esetén mossa le bő szappanos vízzel és váltson kesztyűt. Szembe kerülés esetén ha allergiás reakció lép fel, azonnal forduljon orvoshoz.

Használati utasítás

1. Tisztítás:

Ajánlott kofferdam használata.

Minden osztályú kavitáshoz meg kell tisztítani a zománcot/dentint, valamint szárítani kell a felületeket.

Csonkfelépítés esetén a teljes felületnek tisztának és száraznak kell lennie.

2. Savazás

Használjon Etching gélt a savazáshoz a gyártó utasításainak megfelelően. Ajánlott

NANOFIL® Etchant Gel AT-37 használata.

3. Adagolás

Csavarja le az üveg kupakját. Adagolja a szükséges mennyiségű NANOFIL® Bonding Agent B-10-et a célfelületre és védje a folyadékot a fénytől. Zárja le szorosan az üveget.

Amennyiben szükséges, fertőtlenítse az üveget a helyi higiéniai előírásoknak megfelelően.

4. A folyadék eloszlátása

Vigye fel az anyagot egy kis ecsettel vagy más applikátorral a kavitás teljes felületére és dörzsölje be 30 másodpercig. Ezt követően fújjon enyhe légáramot a folyadékra kb. 5 másodpercig, amíg a film már nem mozdul, jelezve az oldószer teljes elpárolgását. Az indikációtól függően folytassa a munkát a kívánt kompozit vagy kompomer anyaggal a vonatkozó használati utasításban leírtak szerint.

Tárolás

- 2-25°C (36-77°F) hőmérsékleten tárolandó.
- Ne tegye ki az anyagot erős fény hatásának.
- Ne tárolja az anyagot eugenol tartalmú termékek mellett.
- Fertőtlenítse a terméket közepes szintű fertőtlenítéssel.

Lejárat dátum és sorozatszám

Lásd a fecskendőn/csomagoláson lévő megjegyzést.

Garancia

2 év

EC	REP
----	-----

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com