
Használati és kezelési útmutató - NANOFIL® Etchant gél

Termékleírás

A NANOFIL® Etchant gél egy ortofoszforsav alapú sav. A zománc savazására és a dentin kondicionálására használható tömési kezelések keretében.

Kiszerelés

2,5 ml/fecskendő

Összetevők

A NANOFIL® Etchant gél (AT-37) 37% foszforsavat tartalmaz. A termék ezen kívül sűrítőszereket, pigmenteket és vizet tartalmaz.

Javallatok

Zománcmaratás és zománc/dentin savazása a total-etch technikával összefüggésben a bondos ragasztás előtt:

- Kompozit és kompomer restaurációk
- Indirekt restaurációk(pl. inlay, koronák, hidak)
- Barázdazárók

Ellenjavallatok

- Felvitel a pulpához közeli dentinre (1 mm-nél kisebb vastagságú dentinréteg)
- Ne használja Etchant gélre való ismert hiperszenzitivitás esetén.

Mellékhatások

Ez a termék vagy egy összetevője bizonyos esetekben hiperszenzitív reakciókat válthat ki.

Interakciók

A bélelő- és alapozó anyagokat, például a kalcium-hidroxidot, típusuktól és összetételüktől függően feloldhatja a sav.

Figyelmeztetések/Óvintézkedések

NANOFIL® Etchant gél (AT-37) 36% foszforsavat tartalmaz és kémiai égést okozhat. Az etchant gél irritálhatja a szemet. Óvakodjon a szembe, bőrre, gingivára vagy szomszédos fogakra kerüléstől. Szájnyálkahártyával való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítse le. Lenyelés esetén a száját alaposan öblítse ki vízzel, majd igyon sok vizet. Forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan öblítse le szappannal és vízzel. Szemmel való érintkezés esetén alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. Viseljen védőruházatot. Viseljen védőszemüveget/arcvédőt. Azonnal távolítsa el a ruházatát, ami a NANOFIL® Etchant géllal kapcsolatba került.

- Kizárólag fogorvosok rendeltetészerű használatára.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Csak a lejáratí dátum előtt használja.

Használati utasítás

A kezelés megkezdése előtt óvatosan tisztítsa meg a fogakat fluorid mentes polírozó pasztával. Javasolt kofferdam használata. Egyszer használatos applikátort használjon az etchant gél felviteléhez, vagy magát a fecskendőt applikátor csőrrel használja.

1. A zománc területektől kezdve vigye fel a NANOFIL® Etchant gél a kavitás teljes felületére a dentint is beleértve. Biztosítsa a zománc legalább 20 másodpercig de legfeljebb 30 másodpercig tartó savazását, a dentin esetében a kondicionálás ideje legalább 15, legfeljebb 20 másodperc. Kerülje a felületek túlzott savazását. Figyelem! Mély kavitások esetén javasoljuk, hogy a pulpához közeli dentint fedje kalcium hidroxiddal és üveg ionomer cementtel a savazás megkezdése előtt.
2. Használjon 20 másodpercen keresztül vízpermetet az Etchant gél teljes eltávolításához. A kavitásnak teljesen mentesnek kell lennie minden maradványtól.
3. Szárítsa ki a kavitást, de figyeljen rá, hogy a dentin ne száradjon ki! A savazott zománc felülete krétás fehér kell, hogy legyen.
4. Végezze el a kezelés további lépéseit a ragasztó és kompozit anyagokkal a gyártó utasításainak megfelelően.
5. Keresztfertőzés megakadályozása érdekében a használt eldobható tárgyakat az orvosi hulladék megsemmisítésére szolgáló tartályba kell dobni.
6. A maradék etching gél a szennyvízzel együtt kiüríthető, ha vízzel erősen hígított vagy semlegesített.

Tárolás

2-25°C (36-77°F) hőmérsékleten tárolandó.

Lejárat dátum és sorozatszám

Lásd a fecskendőn/csomagoláson lévő megjegyzést.

Garancia

3 év

EC	REP
----	-----

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com