
Használati és kezelési útmutató - NANOFIL® Folyékony fogászati kompozit**Termékleírás**

A NANOFIL® folyékony fogászati tömőanyag egy fényrekötő, alacsony viszkozitású, folyékony kompozit. Különböző színárnyalatokban kapható, fecskendős kiszerezésben. A folyékony kompozit színei a NANOFIL® Universal fogászati tömőanyaghoz lettek optimalizálva.

Kiszerezés

3g/fecskendő, 2g/fecskendő

Szín árnyalatok

A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4,M1,M1 Plus

Összetevők

A NANOFIL® folyékony fogászati tömőanyag BIS-GMA és TEGDMA gyantát és báriumüveget tartalmaz.

Javallatok

- Class III és V restaurációkhoz
- Minimálisan invazív, nem terhelésnek kitett üreg helyreállítása
- Alap/bélés direkt restaurációk alá
- Indirekt restaurációk kisebb esztétikai hibáinak javítása
- Barázda és fisszúra zárás
- Alávágás kitöltése
- Ideiglenes tömések javítása

Ellenjavallatok

Hiperszenzitivitás az akril monomerre.

Mellékhatások

Ez a termék vagy egy összetevője bizonyos esetekben hiperszenzitív reakciókat válthat ki.

Interakciók

A fenolok és más anyagok (pl. cink-oxid eugenol) gátolhatják a kötési folyamatot.

Figyelmeztetések/Óvintézkedések

NANOFIL® folyékony fogászati tömőanyag olyan anyagokat tartalmaz, melyik allergiás reakciót válthatnak ki a szemmel vagy végtagokkal érintkezve. Az allergiás reakciók rizikójának csökkentése érdekében használjon védőkesztyűt és szemüveget. Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrfelületet szappannal és vízzel. Kézrel való érintkezés esetén mosson kezet szappannal és vízzel, valamint cseréljen kesztyűt. Szembekerülés esetén, ha allergiás reakció lép fel, kérjen mihamarabb orvosi segítséget.

- Kizárólag fogorvosok rendeltetészerű használatára.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Csak a lejárat dátum előtt használja.

Használati utasítás

1. Fogkö eltávolítás

A fogakat meg kell tisztítani homokfúvóval a felületi foltok eltávolításához.

2. Színárnyalat választás

A fog izolálása előtt válassza ki a megfelelő színárnyalato(ka)t. A NANOFIL® Universal fogászati kompozit színárnyalatai megegyeznek a VITAPAN színkulcsnak megfelelő színárnyalatokkal.

3. Izoláció

Kofferdam használata a javasolt izolációs technika. Vattarollni és nyálszívó kombinációja szintén használható.

4. Pulpa védelem

Amennyiben szükséges, a kavitás alját fedje be egy réteg kalcium hidroxid pasztával.

5. Savazás és ragasztás

Class III és V restaurációk, minimálisan invazív, terhelésnek nem kitett kavitások és barázdák esetén NANOFIL® Etchant gél és NANOFIL® Bonding Agent használata javasolt.

6. A kavitás tömése

Oszlassa el egyenletesen a NANOFIL® folyékony fogászati tömőanyagot a bondozott kavitáson vagy célfelületen. A tömés elkészítéséhez félig átlátszó formacsíkok használhatóak.

7. Kötés

400-1000 mW/cm² intenzitású halogén- vagy LED-fény használata javasolt. Világos árnyalatok esetén minimum 20 másodperces megvilágítás, míg sötétebb árnyalatok esetén minimum 40 másodperces megvilágítás javasolt.

8. Befejező lépések

8.1. Alap/bélésként alkalmazva

Vigyen fel kompozit tömőanyagot, mint pl. NANOFIL® Universal fogászati tömőanyagot direkt a megkötött NANOFIL® folyékony fogászati tömőanyagra. Kövesse a gyártó utasításait a felvitel, kötés, finírozás és polírozás tekintetében.

8.2. Direkt restaurációként alkalmazva

8.2.1. Állítsa helyre a kontúrokat finom szemcseméretű gyémántokkal.

8.2.2. Ellenőrizze az okklúziót artikulációs papírral. Óvatosan javítsa az okklúziót anyag eltávolításával, amennyiben szükséges.

8.2.3. A tömést alakítsa és dolgozza ki az igényeknek megfelelően erre alkalmas finírozókkal és polírozókkal.

8.3. Barázda és físzúra záróként alkalmazva

Óvatosan távolítsa el fényre kötés után visszamaradt felesleges réteget polírozó paszta segítségével.

Tárolás

2-25°C (36-77°F) hőmérsékleten tárolandó.

Ne tegye ki a terméket sugárzó hő vagy erős fény hatásának.

Ne tárolja az anyagokat eugenol tartalmú termékek közelében.

Használat után távolítsa el a csőrt és helyezze vissza a kupakot. Fertőtlenítse a termékeket egy közepes szintű fertőtlenítési eljárással.

Lejárat dátum és sorozatszám

Lásd a fecskendőn/csomagoláson lévő megjegyzést.

Garancia

3 év

EC	REP
----	-----

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com